

Pôle médico-technique 1 Laboratoire de Biologie	
<i>Protocole</i>	Code : PRE-PTC-PVT-007
Recommandations pour la maîtrise du prélèvement urinaire	
	Version : 02
	Date d'application : 26/01/2023

Prélèvement du tube de Chimie urinaire



+



**Pot de recueil
Réf364941**

**Tube Bouchon beige
Vide 4ml
Réf 368500**



Prélèvement du tube pour ECBU




+



**Pot de recueil
Réf364941**

**Monovette Acide borique
verte**

**Si biochimie et
ECBU**

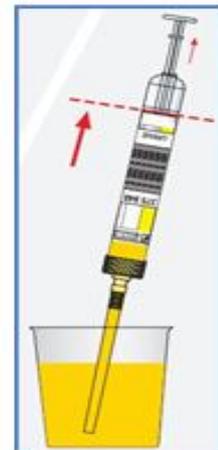

+



SI ECBU SEUL

**Monovette Acide borique
verte**

Ordre de prélèvement

①



②



Prélèvement d'urines de 24H


Au lever :

- Vider la totalité de la vessie dans les toilettes
- Noter sur le flacon : Nom, prénom, date et heure du début du recueil

Pendant 24H :

- Recueillir la totalité des urines dans le flacon jusqu'à l'heure indiquée au départ

Transfert depuis le conteneur de recueil vers le tube

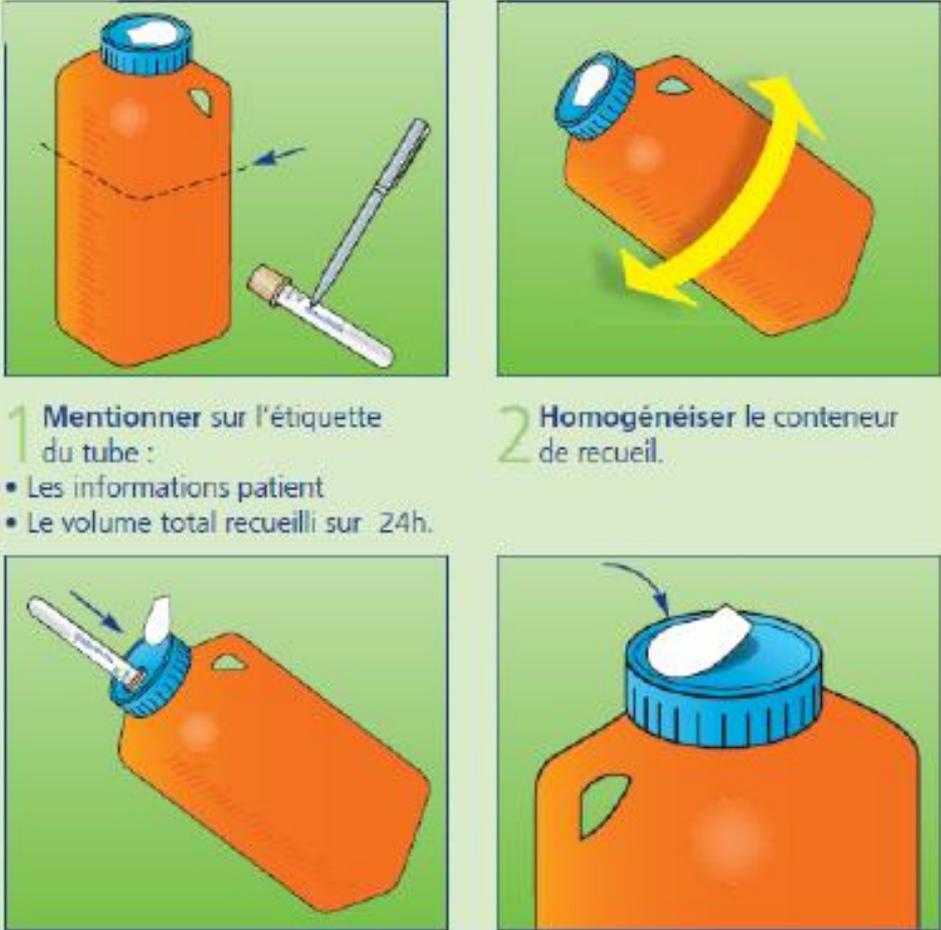

The diagram consists of four numbered steps, each with an illustration and text:

- 1** Mentionner sur l'étiquette du tube :
 - Les informations patient
 - Le volume total recueilli sur 24h.
- 2** Homogénéiser le conteneur de recueil.
- 3** Soulever l'opercule autocollant. Insérer le tube et le percuter. Attendre la fin du remplissage et transmettre le tube au laboratoire.
- 4** Replacer l'opercule autocollant sur l'orifice du couvercle.